

Suprasorb® H

Curativo hidrocoloide para feridas

Fino e flexível para um ambiente de cicatrização ideal da ferida.




O Suprasorb H cria um ambiente úmido ideal nas feridas com exsudação leve a moderada, promovendo uma cicatrização confiável.

Uma camada hidrocoloide absorvente, aplicada a um filme de poliuretano, expande-se em contato com a ferida para formar um gel que se liga ao exsudato e aos restos teciduais. Essa formação de gel permite ao curativo se moldar à estrutura da ferida. Todas as versões do Suprasorb H são especialmente finas e flexíveis. É fácil e seguro de usar devido às suas excelentes propriedades adesivas. Visto que o curativo repele bactérias e fluidos, os pacientes podem se lavar e tomar banho sem problemas. O Suprasorb H thin está disponível no tamanho de 5 x 5 cm especificamente para o tratamento do pé diabético.

Intervalo de troca do curativo

O intervalo de troca do curativo é determinado pelo profissional responsável com base nas condições da ferida, grau de exsudação e eventual curativo primário, o mais tardar após 5 a 7 dias. O curativo deve ser trocado se houver uma formação grave de bolhas estendendo-se além da superfície da ferida.

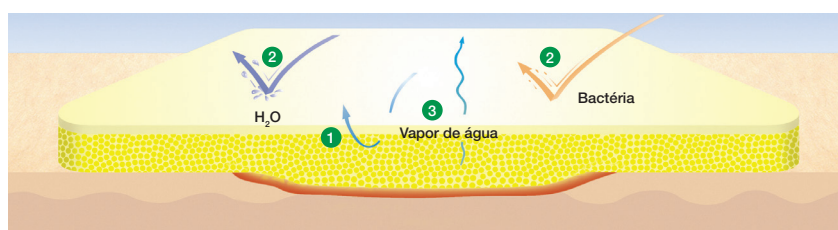

- 1 O hidrocoloide se expande ao absorver o exsudato, formando um gel que se liga ao exsudato e aos restos teciduais.
- 2 repele bactérias e fluidos
- 3 O excesso de vapor de água se evapora

Informação para encomenda

Suprasorb® H

Curativo hidrocoloide para feridas, estéril, selados individualmente

Tamanho (cm)	REF	Unidades de expedição (unid.)	Peso em kg (SC/TC)
standard			
10 x 10	20403	10/660	0,16/10,88
15 x 15	20401	5/50	0,23/2,40
20 x 20	20402	5/50	0,36/3,80
thin			
5 x 5	20424	10/1650	0,03/5,88
5 x 10	20410	10/480	0,07/3,40
5 x 20	20411	10/250	0,13/3,30
10 x 10	20412	10/720	0,12/8,71
15 x 15	20413	5/50	0,14/1,50
20 x 20	20414	5/50	0,23/2,40
sacrum			
14 x 16	20430	5/200	0,21/8,80
border			
14 x 14	20420	5/200	0,18/7,40

Áreas de aplicação

- feridas de exsudação moderada (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- feridas de exsudação leve (Suprasorb H thin)
- feridas superficiais
- feridas não infectadas
- em todas as fases de cicatrização da ferida, p. ex.:
 - ◆ úlceras de diferentes origens
 - ◆ queimaduras de segundo grau
 - ◆ áreas doadoras de enxertos de pele
 - ◆ feridas pós-operatórias

Propriedades

- cicatrização muito boa de feridas devido ao bom controle do exsudato
- muito confortável devido à fácil aplicação do curativo
- especialmente fino e flexível
- repele bactérias e fluidos
- permite o banho

Combinações recomendadas

- Suprasorb A
- Suprasorb G Gel amorfo
- terapia de compressão

Observação

- O Suprasorb H thin está disponível no tamanho de 5 x 5 cm especificamente para o tratamento do pé diabético.