

**Instrução de uso:** Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.


1. Cortar o curativo na dimensão adequada;




2. Remover o papel de proteção (planimetria) do filme. O lado do filme que ficará próximo à pele é o que está coberto com esse papel de proteção;




3. Aplique de forma firme a película do Filme Transparente em Rolo Wound Care F sobre a área desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;

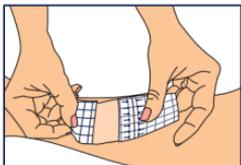

4. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação conforme as setas indicativas;

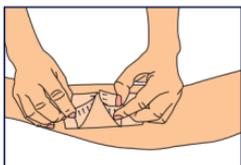

5. Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.

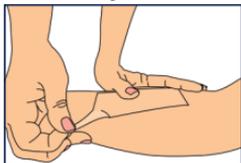

**Composição:** Filme de poliuretano semipermeável revestido por um adesivo de poliacrilato.

**Produto não estéril.**

**Indicação de uso:** Fixação e cobertura de curativos primários, cobertura de suturas, fixação de tubos, drenos e bolsas de perna, proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana), cobertura protetora da pele, proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

**Advertências/Precauções:** Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão.

**Contraindicações:** O Filme Transparente em Rolo Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

**Armazenamento:** O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

**Dimensões disponíveis:** 5cm x 10m / 10cm x 10m / 15cm x 10m

**Validade:** 5 anos

**Fabricado por:** SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD  
999 Liuchen Rd, Pudong New Area, Shanghai 201202, China

**Importado por:**

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda  
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850  
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

**Anvisa n.º:** 8003400110

**Resp. Técnico:** Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76111

**FALE CONOSCO**



Para mais  
informações

