



**Instrução de uso:** Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.


1. Abra a embalagem tipo peel-off e tire para fora o produto, mantendo intacta a sua esterilidade;

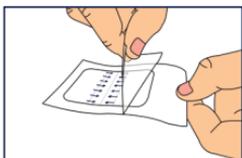

2. Remova parcialmente o papel de cobertura, puxando pelas linguetas com o polegar e o indicador;

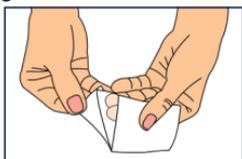


3. Vire o produto de modo que o adesivo fique sobre a região desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;

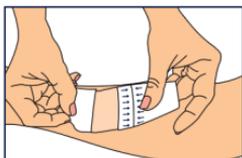

4. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação conforme as setas indicativas;



5. Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.

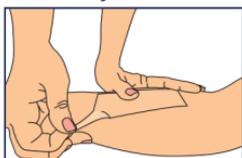

**Composição:** Filme de poliuretano semipermeável revestido por um adesivo de poliacrilato.

**Produto esterilizado por óxido de etileno.**

**Indicação de uso:** Feridas superficiais, proteção de tecido epitelial novo, curativo secundário, fixação de cateter, cobertura de suturas, fixação de tubos, drenos e bolsas de perna, proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocateriana), cobertura protetora da pele, proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

**Advertências / Precauções:** Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão. A frequência de troca do filme deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

**Contraindicações:** O Filme Transparente Estéril Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

**Armazenamento:** O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

**Dimensões Disponíveis:**

5cm x 7cm / 10cm x 12cm / 10cm x 25cm / 20cm x 30cm / 30cm x 30cm

**Validade:** 5 anos

**Fabricado por:** SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD  
999 Liuchen Rd, Pudong New Area, Shanghai 201202, China

**Importado por:**

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda  
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850  
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

**Anvisa n.º:** 8003400112

**Resp. Técnico:** Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 49.339

**FALE CONOSCO**



**0800 191099**



**sac@polarfix.com.br**  
**www.polarfix.com.br**

Para mais  
informações

