


**Instrução de uso:** Antes de aplicar a bandagem e se existir uma ferida cubra com um curativo correspondente ao estado da ferida.

Recomenda - se o uso da malha tubular e da bandagem Rosifix Soft nos membros, antes de aplicar a bandagem Rosifix.

**Para os membros inferiores:**

1. Comece aplicando Rosifix na região da articulação metatarsofalangeana, de modo que todas as curvas da bandagem sobreponham-se umas as outras por aproximadamente 1/2 a 2/3 da sua largura, envolvendo o pé do paciente.

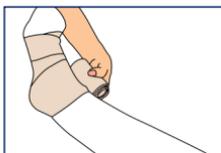


2. Após a bandagem cobrir o calcanhar, volte com a mesma em direção ao dorso do pé e em seguida em direção à sola do pé, seguindo em direção ao tornozelo.




3. Finalize a volta com a aplicação da bandagem acima do calcanhar em direção ao tendão de Aquiles.



4. Termine de enrolar a bandagem cobrindo a panturrilha parando a 5 cm abaixo da fossa poplíteia. Caso o enfaixamento seja feito no membro todo, deve-se deixar livre a articulação do quadril. Se necessário, utilize uma segunda bandagem.

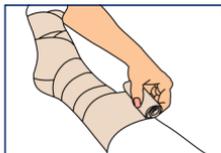

5. Fixe as bandagens apenas com fitas adesivas e não com os grampos, pois podem causar lesões.

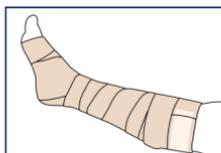


**Para os membros superiores:**

1. Comece aplicando Rosifix na região da articulação metacarpofalangeana de modo que todas as curvas da bandagem sobreponham-se umas as outras por aproximadamente 1/2 a 2/3 da sua largura, envolvendo a mão do paciente.




2. Realize movimentos circulares com a bandagem Rosifix da área distal para proximal, usando a técnica de enfaixamento espiral e/ou "técnica em oito".

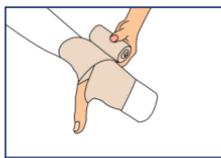


3. Após cobrir a mão, aplique a bandagem em direção ao antebraço (rádio e ulna) e ao braço (úmero).



4. Finalize a aplicação da Rosifix, mantendo uma distância de 5 cm abaixo da região axilar.

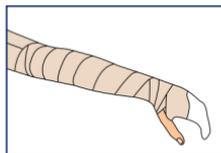

5. Fixe a bandagem Rosifix apenas com fitas adesivas e não com os grampos, pois podem causar lesões.

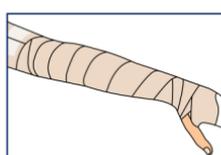

**Composição:** Bandagem 100% algodão; Grampos de cor bege de metal com núcleo de elastodieno.

**Produto Não Estéril.**

**Indicação de uso:** A Rosifix: Bandagem de Curto Estiramento é designada para:

- Terapêutica de compressão: em afecções flebológicas e linfedemas, por exemplo, varizes, insuficiência venosa, tromboflebite, flebotrombose, síndrome pós-trombótica, insuficiência venosa crônica dos graus I a III, úlcera venosa da perna, em caso de edemas, após esclerose e intervenções cirúrgicas;
- Terapêutica de suporte e alívio: para profilaxia e tratamento de contusões, distorções, lesões tendinosas e luxações.

**Advertências/Precauções:** O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

**Contraindicações:** Doença arterial oclusiva periférica avançada, insuficiência cardíaca descompassada, flebite séptica, flegmasia cerúlea dolens, distúrbios de sensibilidade cutânea, hipersensibilidade ao material da bandagem. O produto não é recomendado quando o Índice de Pressão Tornozelo-Braquial (ITB) estiver abaixo de 0,8.

**Armazenamento:** O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente limpo, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

**Dimensões Disponíveis:** 6cm x 5m / 8cm x 5m / 10cm x 5m

**Validade:** 5 anos

**Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros CRF-SP: 49.339

Cadastro Anvisa: 8003400103

E-mail: [sac@polarfix.com.br](mailto:sac@polarfix.com.br) SAC: 0800 019 1099

Site [www.polarfix.com.br](http://www.polarfix.com.br)

Para mais  
informações

