


**Instrução de uso:** Antes de aplicar a bandagem e se existir uma ferida cubra com um curativo correspondente ao estado da ferida. Recomenda - se o uso da malha tubular antes de aplicar a bandagem Rosifix Soft.

**Para os membros inferiores:**

1. Comece aplicando Rosifix Soft na região da articulação metatarsofalangeana, de modo que todas as curvas da bandagem sobreponham-se umas as outras por aproximadamente 1/3 a 1/2 da sua largura, envolvendo o pé do paciente.

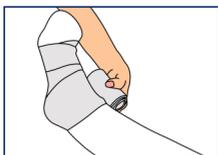


2. Após a bandagem cobrir o calcanhar, volte com a mesma em direção ao dorso do pé e em seguida em direção à sola do pé, seguindo em direção ao tornozelo.




3. Finalize a volta com a aplicação da bandagem acima do calcanhar em direção ao tendão de Aquiles.



4. Termine de enrolar a bandagem cobrindo a panturrilha parando a 5 cm abaixo da fossa poplíteia. Caso o enfiamento seja feito no membro todo, deve-se deixar livre a articulação do quadril. Se necessário, utilize uma segunda bandagem.

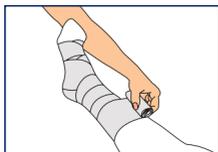

5. Fixe as bandagens apenas com fitas adesivas e não com os grampos, pois podem causar lesões.

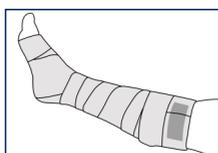

**Para os membros superiores:**

1. Comece aplicando Rosifix Soft na região da articulação metacarpofalangeana de modo que todas as curvas da bandagem sobreponham-se umas as outras por aproximadamente 1/3 a 1/2 da sua largura, envolvendo a mão do paciente.




2. Realize movimentos circulares com a bandagem Rosifix Soft da área distal para proximal, usando a técnica de enfiamento espiral.




3. Após cobrir a mão, aplique a bandagem em direção ao antebraço (rádio e ulna) e ao braço (úmero).



4. Finalize a aplicação da Rosifix Soft, mantendo uma distância de 5 cm abaixo da região axilar.

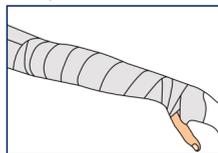

5. Fixe a bandagem Rosifix Soft apenas com fitas adesivas e não com os grampos, pois podem causar lesões.

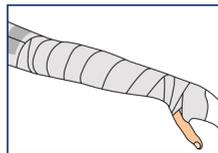

**Composição:** Espuma 100% poliuretano; Clipes de fixação com dois ganchos de alumínio conectados por uma corda de borracha sem látex.

**Produto Não Estéril.**

**Indicação de uso:** Acolchoar membros sob bandagens compressivas aplicadas em indicações de linfologia e flebologia. Pode ser utilizada em combinação com bandagem de curto estiramento em terapias compressivas, para distribuir uniformemente a compressão aplicada pela bandagem aos membros, garantindo um tratamento seguro sem constrição. Além disso, a Rosifix Soft é apropriada como revestimento sob gesso ortopédico e para proteção de curativos, cânulas ou talas.

**Advertências/Precauções:** O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. O amarelamento do produto é um fenômeno natural que não afeta suas características de qualidade nem sua aplicação. As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar. A Bandagem de Espuma deve ser colocada em contato apenas com pele saudável e sem escoriações.

**Contraindicações:** O produto é contraindicado às pessoas que apresentam hipersensibilidade ou alergia aos componentes da bandagem de espuma.

**Armazenamento:** O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente limpo, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

**Dimensões Disponíveis:** 10cm x 0,4cm x 2,5m / 12cm x 0,4cm x 2,5m

**Validade:** 5 anos

**Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850  
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira  
Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros CRF-SP: 49.339  
Cadastro Anvisa: 8003400104  
E-mail: [sac@polarfix.com.br](mailto:sac@polarfix.com.br) SAC: 0800 019 1099  
Site [www.polarfix.com.br](http://www.polarfix.com.br)

Para mais  
informações

