


Instrução de uso: Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.



1. Abra a embalagem tipo peel-off e tire para fora o produto, mantendo intacta a sua esterilidade;





2. Remova parcialmente o papel de cobertura, puxando pelas linguetas com o polegar e o indicador;

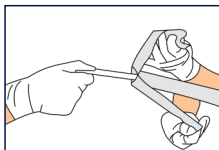


3. Vire o produto de modo que o adesivo fique sobre a região desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;

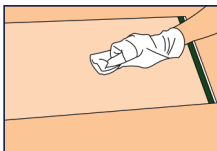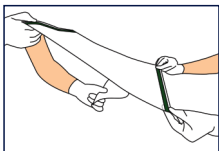

4. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação conforme as setas indicativas;

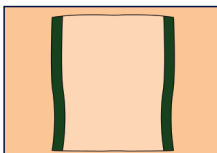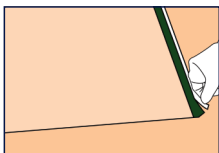

5. Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.

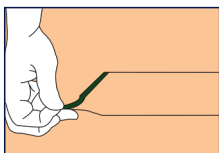

Composição: Filme: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato; Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno em ambos os lados e siliconado em um lado; Papel de cobertura: 100% papel siliconado.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Indicação de uso: O Filme Transparente Estéril Wound Care F - Incisional é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como microrganismos e líquidos. Garante praticidade e segurança durante procedimentos de longa duração.

O Filme Transparente Estéril Wound Care F - Incisional é indicado para:

- Manter uma superfície estéril ao redor da incisão cirúrgica;
- Isolar áreas contaminadas próximas ao local da lesão.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão. A frequência de troca do filme deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

Contraindicações: O Filme Transparente Estéril Wound Care F - Incisional não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Dimensões disponíveis: 36cm x 30cm / 51cm x 55cm / 62cm x 84cm

Validade: 5 anos

Fabricado por: SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
999 Liuchen Rd, Pudong New Area, Shanghai 201202, China

Importado por:

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Anvisa n.º: 8003400112

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76111

