



Instrução de uso: Antes de aplicar o curativo, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.

1. Abra cuidadosamente a embalagem estéril;
2. Aplique o Curativo de Espuma Absorvente Estéril Wound Care P no local desejado com a espuma hidrofílica absorvente (lado branco) voltada para a pele.
3. Caso necessário, aplicar curativo secundário para fixação.

Absorvente estéril

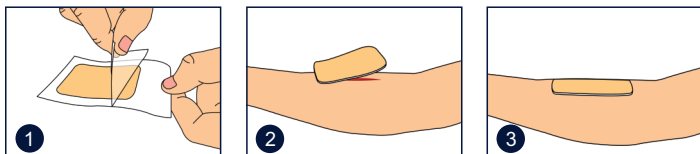

Traqueostomia / Dreno

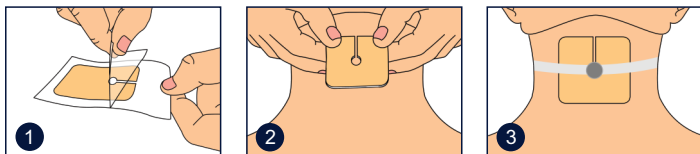

Composição: Filme impermeável: 100% poliuretano; Espuma hidrofílica absorvente: 100% poliuretano.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Indicação de uso: O Curativo de Espuma Absorvente Estéril Wound Care P é indicado para:

- Feridas com leve e moderado exsudato;
- Feridas superficiais;
- Proteção de tecido epitelial novo.
- Proteção em traqueostomia e drenos de diâmetro apropriado.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. A utilização deste produto deve ser acompanhada de um profissional de saúde habilitado. Em caso de irritação, descontinue o uso. Não utilizar em conjunto com oxidantes, soluções oxiclорídricas ou peróxido de hidrogênio. Remover o curativo antes de qualquer tratamento por radiação, raios Alfa, tratamento por ultrassom, diatermia e micro-ondas.

Contraindicações: O Curativo de Espuma Absorvente Estéril Wound Care P não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Dimensões disponíveis: 6cm x 7cm / 9cm x 9cm / 10cm x 10cm / 15cm x 15cm / 20cm x 20cm.

Validade: 5 anos

Fabricado por: Winner Medical Co., Ltd.
China, República Popular

Importado por:

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Anvisa n.º: 8003400113

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76.111

