



Instrução de uso: Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.



1. Abra a embalagem tipo peel-off e tire para fora o produto, mantendo intacta a sua esterilidade;

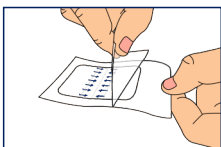


2. Remova parcialmente o papel de cobertura, puxando pelas linguetas com o polegar e o indicador;

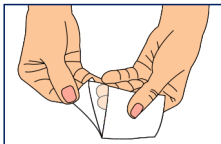


3. Vire o produto de modo que o adesivo fique sobre a região desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;

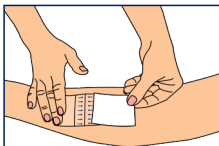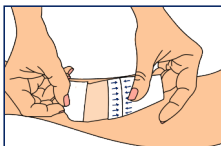

4. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação conforme as setas indicativas;

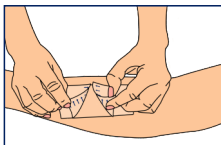

5. Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.

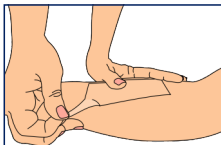

Composição: Filme: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato; Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno em ambos os lados e siliconado em um lado; Papel de cobertura: 100% papel siliconado.

Produto Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação de uso: Feridas superficiais, proteção de tecido epitelial novo, curativo secundário, fixação de cateter, cobertura de suturas, fixação de tubos, drenos e bolsas de perna, proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana), cobertura protetora da pele, proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

Advertências / Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão; A frequência de troca do filme deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

Contraindicações: O Filme Transparente Estéril Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Dimensões Disponíveis:

5cm x 7cm / 10cm x 12cm / 10cm x 25cm / 20cm x 30cm

Validade: 5 anos

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros CRF-SP: 49.339

Cadastro Anvisa: 8003400101

SAC: 0800 019 1099 – Site www.polarfix.com.br

Para mais
informações



www.polarfix.com.br