

107,00 mm



Wound Care P

Curativo de Espuma Absorvente
Estétil

Indicação de uso: O Curativo de Espuma Absorvente Estétil Wound Care P é indicado para:

- Feridas com leve e moderado exsudato;
- Feridas superficiais;
- Proteção de tecido epitelial novo.
- Proteção em traqueostomia e drenos de diâmetro apropriado.




Instrução de uso: Antes de aplicar o curativo, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.

1. Abra cuidadosamente a embalagem estétil;




2. Aplique o Curativo de Espuma Absorvente Estétil Wound Care P no local desejado com a espuma hidrofílica absorvente (lado branco) voltada para a pele.

3. Caso necessário, aplicar curativo secundário para fixação.

Absorvente estétil

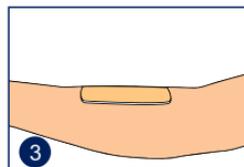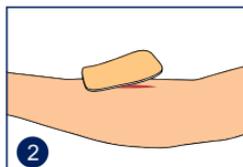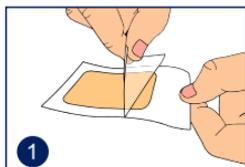

Traqueostomia / Dreno

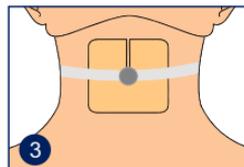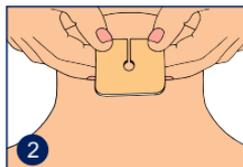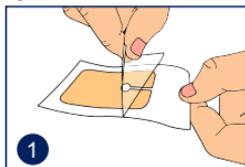

Composição: Filme impermeável: 100% poliuretano; Espuma hidrofílica absorvente: 100% poliuretano.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

160,00 mm

2,04 mm

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. A utilização deste produto deve ser acompanhada de um profissional de saúde habilitado. Em caso de irritação, descontinue o uso. Não utilizar em conjunto com oxidantes, soluções oxiclорídricas ou peróxido de hidrogênio. Remover o curativo antes de qualquer tratamento por radiação, raios Alfa, tratamento por ultrassom, diatermia e micro-ondas.

Contraindicações: O Curativo de Espuma Absorvente Estéril Wound Care P não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Dimensões disponíveis: 5cm x 5cm / 6cm x 7cm / 6cm x 8cm / 7cm x 8cm / 7,5cm x 7,5cm / 8cm x 8cm / 8cm x 9cm / 8,5cm x 9cm / 9cm x 9cm / 10cm x 10cm / 12cm x 12cm / 12,5cm x 12,5cm / 15cm x 15cm / 17,5cm x 17,5cm / 18,5cm x 18,5cm / 20cm x 20cm / 22cm x 22cm

Validade: 5 anos

Fabricante: PHARMAPLAST S.A.E
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Detentor: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76.111

Anvisa nº: 8003409007

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para mais
informações

