



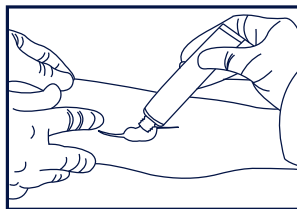



Wound Care G

Hidrogel Amorfo com Alginato

Instrução de uso: Preparar / Enxaguar a ferida com solução fisiológica estéril. Para otimizar a utilização, aplicar de acordo com o diagrama abaixo:

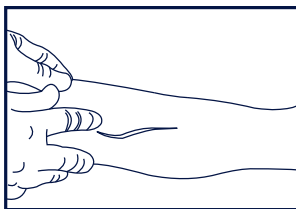

Se indicado, aplicar uma cobertura conforme ilustrado abaixo (item fornecido à parte):

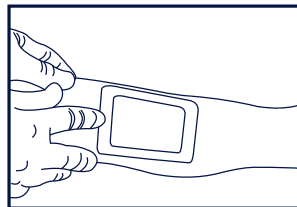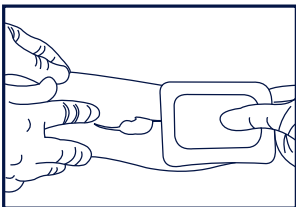

Secar cuidadosamente a pele à volta da ferida;

A ferida não deve ser preenchida em um nível mais alto que a pele ao redor. Cobrir o leito da ferida com um curativo secundário. Para feridas de baixo a alto nível de exsudato, utilizar espuma absorvente permeável. Para feridas com quantidade insignificante de exsudato, fazer a cobertura com um curativo filme estéril. Para otimizar a limpeza de feridas com necrose, recomenda-se que o hidrogel seja trocado pelo menos a cada 72 horas ou quando necessário, considerando a quantidade de exsudato. No caso de feridas limpas, deve ser trocado considerando a quantidade de exsudato.

O gel pode ser removido da ferida lavando-a com água ou solução fisiológica estéril.

Composição: gel amorfo hidratante composto por carboximetilcelulose sódica, alginato de cálcio e sódio e propilenoglicol.

www.polarfix.com.br



Wound Care G

Hidrogel Amorfo com Alginato

Produto estéril - Irradiação Gama.

Indicação de uso: O Hidrogel Amorfo com Alginato Wound Care G é indicado para o tratamento de feridas necróticas e/ou com exsudato, como úlceras da perna, úlceras de pressão e úlceras de pé diabético não infectadas. Também é indicado para tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau. Este gel pode ser usado durante o processo de cicatrização, para proporcionar um ambiente úmido de cicatrização de feridas. Pode ser utilizado em lesões com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de cuidados de saúde.

Advertências/Precauções: Pode ser utilizado em pacientes com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de saúde. Em caso de reação alérgica, descontinuar a sua utilização e consultar o médico. Apenas para uso externo. Não reutilizar o produto (a reutilização pode causar risco de infecção). Caso a embalagem se encontre danificada, não reesterilizar e não utilizar o produto.

Contraindicações: Não aplicar em queimaduras profundas e extensas.

Armazenamento: Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +0° à +40°C – Umidade Relativa: 80% máx. Apenas pode ser utilizado se encontrado íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração nas suas características originais.

Apresentações: 30g e 85g

Validade: 3 anos

Fabricado por: Pharmaplast S.A.E.
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Importado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP - CEP: 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Anvisa n.º: 8003400121

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76.111

FALE CONOSCO



Para Mais
Informações



www.polarfix.com.br