

# Avental Descartável Plus Não Tecido Easy Wear

## Avental Descartável Plus Não Tecido Easy Wear


O Avental Descartável Plus Não Tecido Easy Wear Polar Fix é confeccionado em material 100% polipropileno de alta resistência e maleável, o qual proporciona conforto ao usuário.

O Avental Easy Wear é indicado para procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado pela equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes. Sua confecção em polipropileno oferece proteção a um preço acessível.


O seu design não só facilita a paramentação do usuário devido ao seu fácil encaixe, mas também permite remoção asséptica evitando a contaminação do usuário.



### Instruções Para Remoção do Avental Descartável Plus Não Tecido Easy Wear Polar Fix:

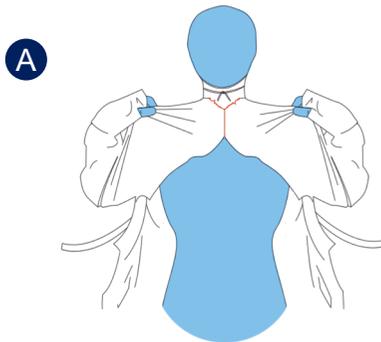

Segure o avental pelos ombros e lentamente puxe-o em sentidos contrários, para rasgar a parte traseira do avental. Essa área do avental apresenta um picote, para facilitar o rasgo;

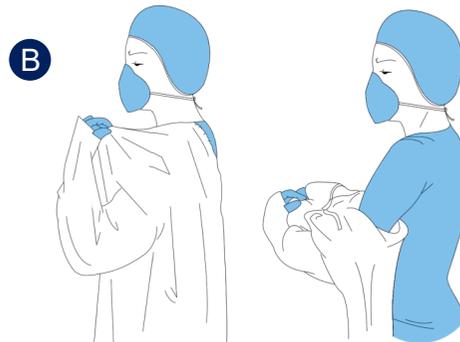

Retire o avental do corpo, puxando-o para frente. Ao mesmo tempo, embrulhe-o com a superfície contaminada voltada para o lado de dentro;



Enquanto você remove as mangas do avental, retire luvas. Por fim, descarte o avental de acordo com a política de descarte do local.