






## Wound Care P

Curativo de Espuma Absorvente Estéril  
com Silicone

### Instrução de uso:

1. Limpar a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais.
  2. Escolher um tamanho de curativo que ultrapasse as margens da ferida em pelo menos 2 cm.
- A) Retirar o curativo estéril da embalagem.
- B) Retirar parte da película de proteção, expondo a parte adesiva do curativo.
- C) Posicionar e retirar a segunda parte da película de proteção.
- D) Retirar lentamente a moldura de filme ao mesmo tempo em que se pressiona cuidadosamente as bordas do curativo para garantir uma boa aderência.

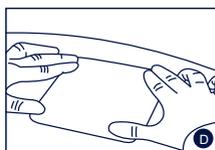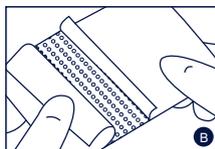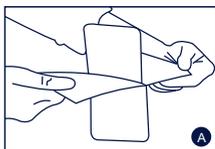

**Composição:** espuma absorvente de poliuretano e fibras superabsorventes revestido de camada semipermeável de poliuretano com adesivo de silicone.

**Produto esterilizado por óxido de etileno.**

[www.polarfix.com.br](http://www.polarfix.com.br)



## Wound Care P

Curativo de Espuma Absorvente Estéril  
com Silicone

**Indicação de uso:** O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P é indicado para o tratamento de vários tipos de feridas com exsudato, tais como: úlceras de pressão, úlceras da perna, úlceras de pé diabético, enxertos de pele e queimaduras de primeiro e segundo grau. Pode ser utilizado em combinação com bandagens de compressão.

**Advertências/Precauções:** O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P só pode ser usado em feridas infectadas sob os cuidados de um profissional de saúde. Em caso de reação alérgica, descontinuar sua utilização e consultar o médico. Não deve entrar em contato com agentes oxidantes, como soluções com hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, uma vez que estes podem decompor o componente de poliuretano absorvente do curativo. Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada, rasgada ou amassada ou se o produto estiver vencido. O fabricante recomenda uso único.

**Contraindicações:** O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida ao silicone ou ao poliuretano presentes no produto.

**Armazenamento:** Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob temperatura: +0° à +40°C - umidade relativa: 80% máx.

**Dimensões disponíveis:** 7,5cm x 7,5cm / 7,5cm x 10cm / 10cm x 10cm / 10cm x 15cm / 10cm x 20cm / 10cm x 25cm / 10cm x 30cm / 12,5cm x 12,5cm / 15cm x 15cm / 17cm x 17cm / 18,5 x 18,5cm / 20cm x 20cm / 20cm x 30cm / 20cm x 50cm / 22cm x 22cm.

**Validade:** 3 anos

**Fabricado por:** Pharmaplast S.A.E.

23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

**Importado por:** POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP - CEP: 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

**Anvisa n.º:** 8003400128

**Resp. Técnico:** Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76.111

FALE CONOSCO



Para Mais  
Informações

[www.polarfix.com.br](http://www.polarfix.com.br)