

Máscara Descartável PFF2 Polar Fix



Indicações de uso: A Máscara Descartável PFF2 Polar Fix é um modelo de respirador com eficiente retenção contra contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis. Atua como barreira protetora que evita a propagação de contaminação entre usuários. A principal característica da máscara PFF2 é a capacidade de filtrar qualquer partícula, seja ela um vírus, bactérias, fumaça ou poeira. Constituída de várias camadas de polímeros não tecido que cria uma vedação hermética contra o rosto do usuário, com fixação por tiras elásticas.

Composição: Confeccionado em não tecido polipropileno - SMS, composto de cinco (05) camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunbond e camadas internas produzidas pelo processo meltblown. Clipe nasal confeccionado em alumínio plastificado. Tiras elásticas em elastano e poliamida.

Especificação Técnica:

- PFF 2 (S) sem válvula;
- Clipe nasal ajustável;
- Semifacial;
- Embalagem com 01 unidade;
- Possui Certificado de Aprovação (CA).
- Definições: PFF: Peça Semifacial Filtrante / (S): para uso contra aerossóis sólidos e líquidos a base de água.
- Produto de uso único, individual e intransferível.

Advertências/Precauções: Durante seu uso correto, você deve substituí-la quando sentir mal odor característico ou sentir falta de ar; deve ser descartada após no máximo o uso por um turno de trabalho. Se a máscara estiver danificada, úmida ou suja, você deve substituí-la imediatamente; não utilizar em ambientes com baixa concentração de oxigênio. Características faciais, como: barba, cicatrizes presentes no rosto do usuário podem interferir na vedação da máscara e expor o usuário ao risco. Máscara sem manutenção de uso.

Validade: 3 anos



Máscara Descartável PFF2 Polar Fix

Código	Embalagem	Cad. Anvisa
FP0124	01 unidade	8003400124