


Instrução de uso: Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.


1. Remova parte do papel de cobertura que contempla as tiras estabilizadoras e a etiqueta de identificação.




2. Remova o papel de cobertura e aplique o filme transparente no local de inserção, alinhando as conexões da inserção com a janela do filme. Certifique-se que o filme está fixo sob o ponto de inserção do cateter e sobre a pele do paciente.

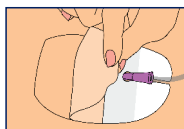


3. Remova o restante do papel de cobertura e aplique sobre as asas do cateter.

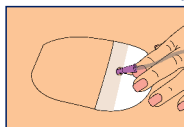


4. Remova o filme de suporte levantando a ponta não adesiva, puxando-o na diagonal até sua total remoção.

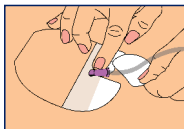

5. Molde o filme transparente ao redor do cateter para completar a aplicação do produto. Remova as tiras estabilizadoras e aplique nas asas do cateter, certificando-se de que as tiras não cubram o ponto de inserção do cateter. Fixe a etiqueta de identificação próximo ao filme. Recomenda-se executar as anotações na fita de identificação antes da aplicação no paciente.

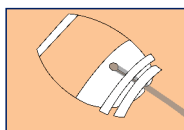

6. Para remover o Filme Transparente IV Estéril Wound Care F, levante delicadamente uma das pontas da película e puxe-a paralelamente à pele com uma das mãos, enquanto a outra segura a pele local e o cateter firmemente. Caso a pele estiver em um estado frágil/sensível, utilize sabão e água morna para inativar o adesivo e facilitar a remoção do curativo.

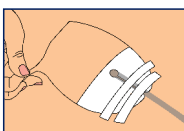

Composição: Filme transparente: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato; Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno em ambos os lados e siliconado em um lado; Papel de cobertura: 100% papel siliconado; Borda estabilizadora reforçada: não tecido 100% poliéster; Fitas estabilizadoras autoadesivas: não tecido 100% poliéster; Etiqueta de dados do paciente: não tecido 100% poliéster.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Indicação de uso: O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F é um filme que se adapta a qualquer contorno corporal e protege o tecido epitelial de fatores externos, como microrganismos e líquidos.

O Filme Transparente Estéril IV Wound Care F é indicado para:

- Fixação de cateteres intravenosos, centrais e periféricos;
- Proteção do sítio de inserção e prevenção de infecção por contaminações externas.

Advertências/Precauções: Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão. A frequência de troca do filme deve ser avaliada pelo profissional da saúde responsável.

Contraindicações: O Filme Transparente IV Estéril Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Dimensões disponíveis: 5cm x 5,7cm / 7cm x 9cm / 9cm x 12cm

Validade: 5 anos

Fabricado por: SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
999 Liuchen Rd, Pudong New Area, Shanghai 201202, China

Importado e distribuído por:

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros CRF-SP: 49.339
Anvisa nº: 8003400111
E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais
Informações

