

Instrução de uso: Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.

1. Cortar o curativo na dimensão adequada;




2. Remover o papel de proteção (planimetria) do filme. O lado do filme que ficará próximo à pele é o que está coberto com esse papel de proteção;



3. Aplique de forma firme a película do Filme Transparente em Rolo Wound Care F sobre a área desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;



4. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação conforme as setas indicativas;

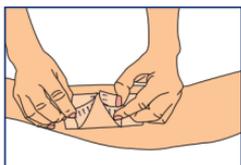

5. Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.



Composição: Filme em 100% poliuretano revestido por um adesivo de poliacrilato hipoalergênico; Filme de suporte em 100% poliéster, revestido com polietileno e silicone; papel de cobertura: 100% papel siliconado; tiras adesivas: filme 100% poliéster e adesivo de poliacrilato.

Produto não estéril.

Indicação de uso: Fixação e cobertura de curativos primários, cobertura de suturas, fixação de tubos, drenos e bolsas de perna, proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocateriana), cobertura protetora da pele, proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

Advertências/Precauções: Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível, aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão.

Contraindicações: O Filme Transparente em Rolo Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas profundas e feridas com alto nível de exsudato.

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, seco e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Dimensões disponíveis: 5cm x 10m / 10cm x 10m / 15cm x 10m

Validade: 5 anos

Fabricado por: SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
999 Liuchen Rd, Pudong New Area, Shanghai 201202, China

Importado e distribuído por:

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Leila M. Leal S. Barros CRF-SP: 49.339

Anvisa nº: 8003400110

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para mais
informações

