


## FIXADOR DE TUBOS, SONDAS E CATETERES NASAL

**Contém 10 unidades**

**Indicação de uso:** Fixação e estabilização de tubos e sondas nasais.

**Instrução de uso:** **A.** Selecionar o tamanho adequado. **B.** Retirar a oleosidade da pele do paciente. **C.** Remover o papel siliconado do fixador e das tiras. **D.** Fixar a sonda no nariz do paciente. **E.** Utilizar a tira adesiva para demarcar o tubo e fixá-lo na face do paciente.

Trocar o fixador conforme houver descolamento ou presença de sujeidade.  
Para remover o dispositivo de fixação, mantenha o tubo/sonda estabilizados durante o procedimento de remoção. Descartar após o uso.

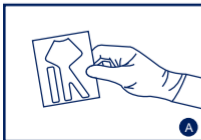



Para Mais  
Informações



**Advertências/Precauções:** O produto não é indicado para aplicações sobre áreas com sinais de infecção ou pele lesionada. Se a adesividade do produto estiver comprometida, substituir o produto. Nunca cortar ou alterar o formato do produto. Suspender o uso em caso de reação alérgica a algum componente do produto. Isento de látex de borracha natural. Produto não estéril. O produto não se destina à fixação de curativos. Para utilização do produto, a pele deve estar seca, livre de resíduos e oleosidade para assegurar uma boa adesão e evitar irritações cutâneas. A troca do fixador é realizada sempre que apresentar sujidade ou descolamento. Não é indicado o uso em pacientes que são alérgicos/sensíveis aos componentes do produto. Caso o paciente apresente qualquer sinal de irritação ou reação alérgica cutânea, remover o fixador e verificar o melhor procedimento a ser adotado conforme o protocolo da instituição.

**Condições de armazenamento:** Armazenar o produto na embalagem original, em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta.

**Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação.

**Fabricado por:** POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76111

Anvisa n.º: 8003400137

E-mail: [sac@polarfix.com.br](mailto:sac@polarfix.com.br) - SAC: 0800 19 1099