
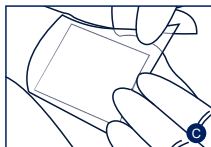
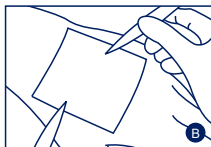


Indicação de uso: O Curativo de Alginato de Cálcio Estéril Wound Care A destina-se ao tratamento de feridas superficiais ou profundas, fortemente exsudativas que também podem estar sujeitas a sangramento, como: úlceras de decúbito, úlceras arteriais, úlceras venosas de perna, úlceras isquêmicas e úlceras diabéticas, feridas pós-operatórias, lesões micóticas, lesões com sangramento.

Instrução de uso:

Limpar a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais.

- A. Escolher um curativo ligeiramente maior que a ferida;
- B. Coloque o curativo em contato com a ferida garantindo que toda superfície seja coberta;
- C. Fixar o curativo de alginato com algum tipo de curativo de fixação secundário.

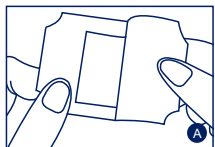

Trocas: Geralmente, os curativos devem ser trocados a cada 24 horas se estiverem em contato com feridas com grande quantidade de exsudato. O curativo deve ser renovado de acordo com as indicações do médico assistente. O alginato pode ficar aplicado na ferida em até 7 dias. Para remover o curativo fazer uso de pinça, ou até mesmo com as mãos, fazendo uso de luvas de procedimento, levantando suavemente o curativo.

Nota: O curativo pode aderir à ferida se aplicado em uma ferida com baixa secreção. A remoção do curativo é facilitada irrigando a ferida com solução salina.

Composição: fibras de alginato de cálcio e sódio.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Advertências/Precauções: Somente deve ser utilizado em pacientes com infecções locais e sistêmicas sob a supervisão de um profissional de saúde. Não deve ser utilizado em feridas com pouca drenagem de exsudato ou em tecido desvitalizado ou necrosado. Em caso de reação alérgica, descontinuar a sua utilização e consultar o médico. O curativo não é indicado para ser utilizado como compressa cirúrgica ou para proporcionar hemostasia em feridas com muito sangramento. O curativo pode aderir à ferida se aplicado em uma ferida com baixa secreção. A remoção do curativo é facilitada irrigando a ferida com solução salina fisiológica estéril. O fabricante recomenda o uso único. Caso a embalagem se encontre danificada, não utilizar o produto. A esterilidade é assegurada enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Quando usado em feridas infectadas, a infecção deve ser inspecionada e tratada de acordo com o protocolo clínico local.

Condições de armazenamento e conservação: Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +0° à +40°C – Umidade Relativa: 80% máx.

Contraindicações: O curativo de alginato não é recomendado em bebês com menos de 12 meses de idade e gestantes. Não utilizar em pacientes com alergia conhecida aos alginatos. Não deve ser utilizado em queimaduras de terceiro grau. Não use em tecidos secos ou necróticos.

Dimensões disponíveis: 2cm x 30cm, 10cm x 10cm, 10cm x 20cm e 20cm x 20cm.

Validade: 3 anos

Fabricado por: Pharmaplast S.A.E.
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Importado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76.111

Anvisa nº: 8003400133

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais
Informações

