
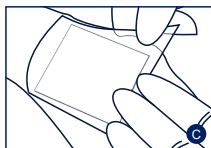
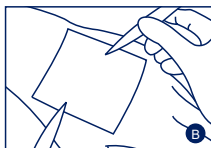


Indicação de uso: Indicado para o uso em feridas infectadas ou com risco de infecção, com alta ou moderada quantidade de exsudatos, como: queimaduras de segundo grau, úlceras do pé diabético, úlceras de pressão e úlceras de pernas, feridas cirúrgicas e pós-operatórias, feridas traumáticas, feridas com tendência a sangramento, feridas oncológicas e áreas enxertadas (doadora e receptora).

Instrução de uso:

Lavar as mãos e limpar a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais.

- A. Escolher um curativo ligeiramente maior que a ferida;
- B. Coloque o curativo em contato com a ferida garantindo que toda superfície seja coberta, sobrepondo cerca de 1 cm de pele ao redor da ferida. Em caso de ferida profunda, preencher cerca de 80% do seu volume com o curativo, deixando aproximadamente 2,5 cm fora da ferida.
- C. Fixar o curativo de hidrofibra com algum tipo de curativo de fixação secundário.

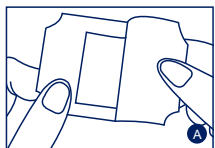

Trocas: O curativo deve ser removido quando clinicamente indicado e/ou quando a ferida estiver próxima a cicatrizar. Irrigar com solução salina caso haja curativo residual na ferida.

Composição: O produto é constituído por carboximetilcelulose e íons de prata, (concentração de prata iônica de 1,2%). Apresenta dupla camada de fibras de carboximetilcelulose com prata reforçadas altamente resistentes.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Advertências/Precauções: Fabricante recomenda uso único. Vasos sanguíneos recém-formados e delicados podem produzir um exsudato sanguinolento. Caso haja desenvolvimento da infecção durante uso deste curativo, a infecção deve ser monitorada e supervisionada pelo médico responsável e tratado de acordo com o protocolo clínico da instituição. O controle da glicose no sangue deve ser monitorado quando em uso no tratamento de úlceras de pé diabético.

Condições de armazenamento, transporte e conservação: Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o prazo de validade estiver expirado. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob temperatura: +0° à +40°C. O curativo pode ser utilizado se encontrado íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração nas suas características originais.

Contraindicações: O Curativo Hidrofibra Estéril com Prata Wound Care Acqua Ag não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida aos componentes presentes no produto.

Dimensões disponíveis: 2cm x 45cm, 10cm x 10cm, 15cm x 15cm e 20cm x 20cm.

Validade: 5 anos

Fabricado por: Pharmaplast S.A.E.
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Importado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP - CEP: 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76.111

Anvisa nº: 8003400140

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais
Informações

