


FIXADOR DE TUBOS, SONDAS E CATETERES ENDOTRAQUEAL

Contém 10 unidades

Indicação de uso: Fixação e estabilização de tubos, sondas e cateteres endotraqueais.

Instrução de uso: **A.** Selecionar o modelo de fixador adequado. **B.** Retirar a oleosidade da pele do paciente entorno da boca. **C.** Remover o papel siliconado do fixador e colocar a parte superior sobre o buço do paciente. **D.** Posicionar o fixador sobre a pele e o prolongamento no tubo endotraqueal. **E.** Enrolar o prolongamento entorno do tubo endotraqueal.

Realizar a troca do fixador conforme houver descolamento ou presença de sujidade ou mediante protocolo de troca da instituição.

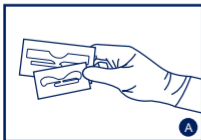



Para Mais
Informações



Advertências/Precauções: O produto não é indicado para aplicações sobre áreas com sinais de infecção ou pele lesionada. Se a adesividade do produto estiver comprometida, substituir o produto. Nunca cortar ou alterar o formato do produto. Suspender o uso em caso de reação alérgica a algum componente do produto. O produto não se destina à fixação de curativos. Para utilização do produto, a pele deve estar seca, livre de resíduos e oleosidade para assegurar uma boa adesão e evitar irritações cutâneas. Não é indicado o uso em pacientes que são alérgicos/sensíveis aos componentes do produto. Caso o paciente apresente qualquer sinal de irritação ou reação alérgica cutânea, remova o fixador e verifique o melhor procedimento a ser adotado conforme o protocolo da instituição.

Condições de armazenamento: Armazenar o produto na embalagem original, em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76111

Anvisa n.º: 8003400137

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099