



FIXADOR DE TUBOS, SONDAS E CATETERES VESICAL

Contém 10 unidades

Indicação de uso: Fixação e estabilização de tubos, sondas e cateteres.

Instrução de uso: **A.** Selecionar o tamanho adequado. **B.** Retirar a oleosidade da pele do paciente. **C.** Posicionar corretamente a sonda ou cateter vesical no local onde será fixado. **D.** Remover o papel siliconado do fixador. **E.** Colocar a parte central do fixador onde se encontra o tubo e posteriormente fixar as extremidades.

Realizar a troca do fixador conforme houver descolamento, presença de sujidade ou mediante protocolo de troca da instituição.

Advertências/Precauções: O produto não é indicado para aplicações sobre áreas com sinais de infecção ou pele lesionada. Se a adesividade do produto estiver comprometida, substituir o produto. Nunca cortar ou alterar o formato do produto. Suspender o uso em caso de reação alérgica a algum componente do produto. Isento de látex de borracha natural. Produto não estéril. O produto não se destina à fixação de curativos. Para utilização do produto, a pele deve estar seca, livre de resíduos e oleosidade para assegurar uma boa adesão e evitar irritações cutâneas. Não é indicado o uso em pacientes que são alérgicos/sensíveis aos componentes do produto. Caso o paciente apresente qualquer sinal de irritação ou reação alérgica cutânea, remova o fixador e verifique o melhor procedimento a ser adotado conforme o protocolo da instituição.

Condições de armazenamento: Armazenar o produto na embalagem original, em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76111

Anvisa n.º: 8003400137

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099