



CURATIVO TIRAS PARA SUTURA ESTÉRIL STRIP FIX

Indicação de uso: O Curativo Tiras para Sutura Estéril Strip Fix é indicado como dispositivo para fechamento da pele, no tratamento de lacerações e incisões cirúrgicas. O Curativo Tiras para Sutura Estéril Strip Fix também pode ser usado em conjunto com suturas ou após a remoção da sutura, como suporte. Deve ser usado por um profissional de saúde.

Instrução de uso: Limpe e seque a pele. Abra a embalagem apenas no momento do uso. Segure uma tira e desprenda da cartela. Junte as bordas da pele com os dedos ou com auxílio de pinças. Coloque as tiras de um lado ao outro do ferimento, assegurando aplicação sem tensão. Em ferimentos maiores a tensão deve ser distribuída, colocando as tiras com intervalos de 3mm entre elas. Proceder da mesma forma quando houver o fechamento da pele com suturas ou grampos. A colocação de fitas paralelas à ferida cerca de 12mm distantes das fitas pode reduzir a força de tensão a que a ferida está submetida.

Produto esterilizado por Óxido de Etileno

Dimensões disponíveis: 4.0mm x 38mm; 6.4mm x 76mm; 6.4mm x 102mm; 13mm x 102mm e 26mm x 102mm.

Advertências/Precauções: Deve ser usado por um profissional de saúde. Não aplicar o produto sob tensão. Não use tintura de benjoim, álcool, éter, benzina e outros solventes para a remoção. Se necessário, use vaselina. Não reutilizar. Não reesterilizar. Fabricante recomenda uso único. A esterilidade é garantida a menos que a embalagem sofra danos. Não utilizar fora do prazo de validade. Suspender o uso em caso de reação alérgica a algum componente do produto. Isento de látex de borracha natural.

Contraindicações: Não deve ser utilizado quando não for possível obter boa adesão, como por exemplo, presença de exsudatos, oleosidade da pele, umidade, presença de pelos. Não deve ser usado em feridas infectadas. Não deve ser usado em ferimentos onde não seja possível unir as bordas ou naqueles em que a união das bordas ocorra sob tensão elevada da pele. Não é indicado o uso em pacientes que são alérgicos/sensíveis aos componentes do produto.

Condições de armazenamento: Armazenar o produto na embalagem original, em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 2 anos

Fabricado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76111

Anvisa n.º: 8003409005

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais
Informações

