


Indicação de uso: Indicado para o tratamento de feridas na fase de granulação e epitelização com nenhum ou pouco exsudato. O curativo é indicado para queimaduras, feridas traumáticas, abrasões, feridas pós-operatórias, úlceras de perna, úlceras de pressão, úlceras de pé diabético e epidermólise bolhosa.

Instrução de uso:

Limpar a ferida de acordo com os protocolos clínicos locais e, em seguida, enxaguar com soro fisiológico. Secar ao redor da ferida com cuidado. O curativo pode ser recortado para acomodar o tamanho e a área da ferida, se necessário.

1. Escolher um curativo ligeiramente maior que a ferida e abrir o poucho unitário com a técnica asséptica.
2. Remover a camada protetora do curativo;
3. Utilizar uma pinça para posicionar o curativo na ferida;
4. Colocar o curativo em contato com a ferida, garantindo que toda superfície seja coberta;
5. Cobrir a matriz de lipocolóide com um curativo secundário absorvente compatível com nível de exsudato da ferida;
6. Por fim, cobrir o conjunto com um curativo de fixação. Curativo de fixação não deve ser oclusivo, para que não dificulte a troca de gases entre o curativo primário e o ambiente.

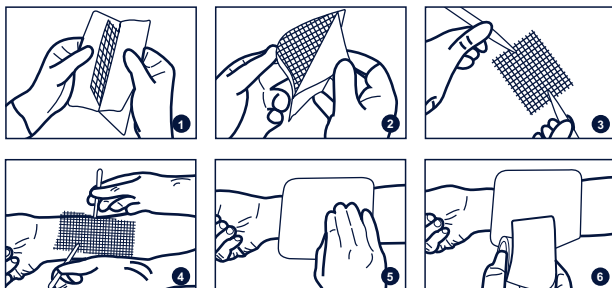

Trocas: O curativo deve ser renovado de acordo com as indicações do médico assistente. Ele pode ficar aplicado na ferida até 7 dias. Para pacientes com epidermólise bolhosa, o curativo deve ser trocado a cada 1 ou 3 dias. Para remover o curativo, fazer uso de pinça, ou até mesmo das mãos, fazendo uso de luvas de procedimento, levantando suavemente o curativo.

Composição: Tela de poliéster, parafina, carboximetilcelulose e polímeros transportadores.

Produto esterilizado por radiação gama

Advertências/Precauções: A camada lipocolóide pode aderir às luvas cirúrgicas de látex, por isso é preferível umedecer as luvas com soro fisiológico ou usar pinças esterilizadas para facilitar o manuseio do curativo. O curativo pode ser usado sobre feridas infectadas, mas sob supervisão de um profissional de saúde. Nestes casos, o curativo deve ser trocado diariamente. O uso deste curativo em feridas profundas ou fistulas requer o cuidado de deixar uma parte da tela de lipocolóide visível para permitir a remoção atraumática. Em caso de irritação da pele, eritema ou hipergranulação, favor consultar um profissional de saúde. O produto é estéril e de uso único. Não utilizar se o poucho estiver danificado.

Condições de armazenamento, transporte e conservação: Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +0° à +40°C. Apenas pode ser utilizado se encontrado íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração nas suas características originais.

Contraindicações: Não utilizar em pacientes com alergia conhecida aos componentes utilizados.

Dimensões disponíveis: 5cm x 5cm; 5cm x 10cm; 10cm x 10cm; 10cm x 15cm; 10cm x 20cm; 10cm x 30cm; 15cm x 15cm; 15cm x 20cm; 15cm x 30cm

Validade: 3 anos

Fabricado por: Pharmaplast S.A.E.
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Importado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP - CEP: 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira
Anvisa n.º: 8003400141

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira **CRF-SP:** 76.111

