



FIXADOR IV ESTÉRIL POLAR FIX

Contém 100 unidades de 5cm x 7,4cm

Indicação de uso: O Fixador IV Estéril Polar Fix é indicado para cobrir e proteger áreas de inserção de cateteres periféricos e para fixação de outros dispositivos percutâneos.

Instrução de uso: **A.** Selecionar o tamanho adequado. **B.** Retirar a oleosidade da pele e remover o excesso de pelos do paciente. **C.** Abrir a embalagem de forma asséptica e retirar o Fixador IV Estéril Polar Fix. **D.** Remova as tiras estabilizadoras do papel siliconado e aplique sobre as asas do cateter ou de dispositivos percutâneos, certificando-se de as tiras não cubam seu ponto de inserção. **E.** Remova o papel de cobertura e aplique o Fixador IV no local de inserção, alinhando as conexões da inserção com a janela do fixador. Certifique-se que o fixador está fixo sobre o ponto de inserção do cateter periférico, ou dispositivo percutâneo e sobre a pele do paciente. **F.** Molde o Fixador IV ao redor do cateter ou dispositivo para completar a aplicação do produto. **G.** Para remoção, levante delicadamente uma das pontas da película e puxe-a paralelamente à pele com uma das mãos, enquanto a outra segura a pele local e o cateter ou dispositivo, firmemente. Caso a pele esteja em um estado frágil/sensível, utilize sabão e água morna para inativar o adesivo e facilitar a remoção do fixador.

Produto esterilizado por Óxido de Etileno

Advertências/Precauções: O produto não é indicado para aplicações sobre áreas com sinais de infecção ou sobre pele lesionada. Se a adesividade do produto estiver comprometida, substituir o produto. Necessário realizar a troca se estiver sujo, solto ou úmido. A esterilidade é garantida a menos que a embalagem sofra danos. Não utilizar fora do prazo de validade. Nunca cortar ou alterar o formato do produto. Suspender o uso em caso de reação alérgica a algum componente do produto, Isento de látex de borracha natural. O produto não se destina à fixação de curativos. A hemostasia do ponto de inserção do cateter periférico ou dispositivo percutâneo deve ser obtida antes da aplicação do fixador estéril. Para utilização do produto, a pele deve estar seca, livre de resíduos e oleosidade para assegurar uma boa adesão e evitar irritações cutânea. Caso o paciente apresente qualquer sinal de irritação ou reação alérgica cutânea, remova o fixador e verifique o melhor procedimento a ser adotado conforme o protocolo da instituição.

Condições de armazenamento: Armazenar o produto na embalagem original, em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Fabricado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP, 09370-850

CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira

Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76111

Anvisa n.º: 8003409003

E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais
Informações

