
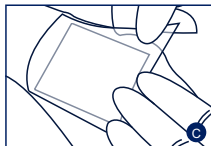
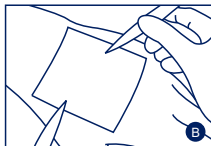


**Indicação de uso:** O Curativo de Carvão Ativado C +Ag é um dispositivo médico não invasivo destinado a feridas superficiais infectadas também caracterizadas pelo mau odor. O curativo é indicado para tratamento de úlceras de pressão, feridas pós-operatórias, úlceras diabéticas e queimaduras do primeiro ou segundo grau.

**Instrução de uso:**

Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo interno.

- A. Abrir a embalagem do produto;
- B. Aplicar o Curativo Carvão Ativado Wound Care C +Ag sobre a ferida. Se necessário, o curativo pode ser cortado.
- C. Fixá-lo com a ajuda de um curativo secundário, como por exemplo, fita adesiva ou filme transparente.

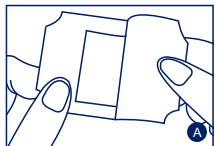

**Trocas:** Recomenda-se que a primeira troca seja feita em até 24 horas. O Curativo Carvão Ativado Wound Care C +Ag pode permanecer sobre a ferida até saturar, podendo ser trocado a cada 7 dias ou por um tempo mais longo conforme avaliação do profissional responsável. A frequência da troca varia com o volume do exsudato, controle do odor e controle de infecção.

O curativo deve ser removido quando clinicamente indicado.

**Composição:** Tecido não tecido e carvão ativado impregnado com íons de prata.

**Produto esterilizado por óxido de etileno.**

**Advertências/Precauções:** Fabricante recomenda uso único. Deve ser aberto de maneira asséptica.

**Condições de armazenamento, transporte e conservação:** Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o prazo de validade estiver expirado. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob temperatura: entre 0° e 40°C. O curativo pode ser utilizado se encontrado íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração nas suas características originais.

**Contraindicações:** Não utilizar em pessoas com conhecida sensibilidade a quaisquer componentes do produto.

**Dimensões disponíveis:** 10,5cm x 10,5cm.

**Validade:** 5 anos

**Fabricado por:** Pharmaplast S.A.E.  
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

**Importado por:** POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP - CEP: 09370-850  
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira  
Resp. Técnico: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76.111  
Anvisa nº: 8003400142  
E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais  
Informações

