
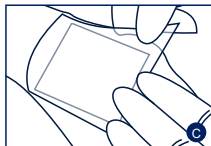
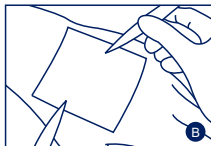


Indicação de uso: Indicado para feridas superficiais infectadas caracterizadas pelo mau odor. O curativo é indicado para tratamento de úlceras de pressão, feridas pós-operatórias, úlceras diabéticas e queimaduras do primeiro ou segundo grau. O carvão ativado adsorve os gases voláteis responsáveis pelo mau odor da ferida, e apresenta efeito bactericida por ter prata em sua composição.

Instrução de uso:

Realizar a limpeza da ferida conforme protocolo interno.

- A. Abrir a embalagem do produto;
- B. Aplicar o Curativo Carvão Ativado Wound Care C +Ag sobre a ferida. Se necessário, o curativo pode ser cortado.
- C. Fixá-lo com a ajuda de um curativo secundário, como por exemplo, fita adesiva ou filme transparente.

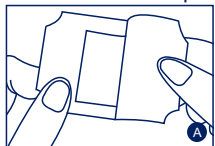

Trocas: O Curativo Carvão Ativado Wound Care C +Ag pode permanecer sobre a ferida até saturar, podendo ser trocado a cada 7 dias ou por um tempo mais longo conforme avaliação do profissional responsável. A frequência da troca varia com o volume do exsudato, controle do odor e controle de infecção.

O curativo deve ser removido quando clinicamente indicado.

Composição: Carvão ativado com íons de prata envolto por uma camada de não tecido de baixa aderência.

Produto esterilizado por óxido de etileno.

Advertências/Precauções: Fabricante recomenda uso único. Deve ser aberto de maneira asséptica.

Condições de armazenamento, transporte e conservação: Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o prazo de validade estiver expirado. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob temperatura: entre 0° e 40°C. O curativo pode ser utilizado se encontrado íntegro na sua embalagem original de fabricação, ou seja, sem qualquer alteração nas suas características originais.

Contraindicações: Não utilizar em pessoas com conhecida sensibilidade a quaisquer componentes do produto.

Dimensões disponíveis: 10,5cm x 10,5cm.

Validade: 5 anos

Fabricado por: Pharmaplast S.A.E.
23512 Amria - Free Zone - Alexandria - Egito

Importado por: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá/SP - CEP: 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira
Resp. Técnica: Nathália da Costa Lima Teixeira CRF-SP: 76.111
Anvisa nº: 8003400142
E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para Mais
Informações

