


Instrução de uso:



1. Preparar e limpar a pele ao redor da lesão removendo bem a umidade;

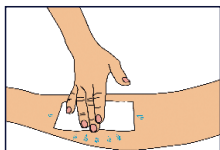


2. Aplicar o curativo adequado sobre a área desejada e selecionar o tamanho desejado da fita, corte com uma tesoura;



3. Remover o papel de proteção da fita adesiva elástica IgoFix e aplicar sobre o curativo;

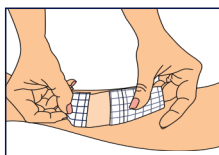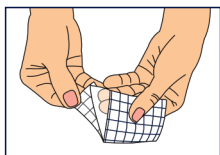

4. Deixar uma borda para ser fixada a pele.

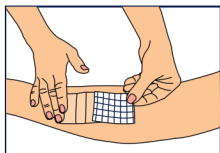

Composição: Poliéster elástico não tecido, adesivo hipoalergênico e papel siliconado.

Produto não estéril.

Indicação de uso: Indicado para a fixação de curativos, drenos e cateteres sobre a pele mantendo-os firmes e seguros. Devido a sua flexibilidade adapta-se bem aos contornos do corpo e permite liberdade de movimentos.

Advertências/Precauções: Fabricante recomenda uso único. Suspender o uso em caso de reação alérgica a algum componente do produto. Não aplicar sob tensão devido ao risco de formação de bolhas e edema.

Contraindicações: A Fita Adesiva Elástica Igofix não é indicada para uso em pacientes que são alérgicos/sensíveis aos componentes do produto.

Armazenamento: Armazenar o produto na embalagem original, em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta.

Dimensões disponíveis: 2,5cm x 10m/ 5cm x 10m / 10cm x 10m / 15cm x 10m

Validade: 5 anos

Fabricado por:

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Rua Ruzzi, 607, Sertãozinho – Mauá / SP, 09370-850
CNPJ: 02.881.877/0001-64 Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Nathalia Costa Lima Teixeira – CRF/SP 76.111
Anvisa nº: 8003400144
E-mail: sac@polarfix.com.br - SAC: 0800 19 1099

Para mais
informações

